



ORTHOPÄDIE SCHUHTECHNIK

Metzgergasse 6
79206 Breisach
Tel. 076 67/940294
Fax 076 67/940499

... denn die Gesundheit fängt bei den Füßen an!

Stand 2013-10

Hinweise zum Tragen von Einlagen

1. Bitte tragen Sie die Einlagen am Anfang nur stundenweise bis Sie sich daran gewöhnt haben.
2. Am Anfang kann es aufgrund der Korrektur zu leichten Beschwerden kommen. Sollten nach vier Wochen noch Beschwerden durch die Einlagen vorliegen, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns, damit wir die Einlagen überprüfen können.
3. Legen Sie die Einlagen nur in die dafür vorgesehenen Schuhe. Sofern notwendig, kaufen Sie sich Schuhe für lose Einlagen.
4. Tragen Sie stets Strümpfe. Entfernen Sie ggf. vorhandene Fußbettungen in den Schuhen, damit Sie nicht überkorrigiert werden.
5. Nehmen Sie Einlagen nach dem Tragen aus den Schuhen heraus, damit die Schuhe und die Einlagen auslüften können. Microfaserbezüge können mit einem feuchten Tuch gewaschen werden.
6. Nach sechs Monaten sollten die Einlagen auf ihre Funktionstauglichkeit überprüft und ggf. durch ein Paar neue Einlagen ersetzt werden.
7. Sie bekommen als Kassenpatient im Regelfalle zwei Paar Einlagen im Jahr. Das zweite Paar wird aus hygienischen Gründen verordnet. Bei Privatpatienten richtet sich die Einlagenanzahl nach den individuellen Verträgen.
8. Die Einlagen sind eine Sonderanfertigung für Sie, im Sinne des MPG und entsprechen der Anforderung des Anhang I der EG – Richtlinie 93/42/EWG.
9. Die Einlagen werden nicht für Sicherheitsschuhe produziert und sind dafür nicht vorgesehen.
10. Diabetiker müssen Einlagen und Füße täglich auf Defekte, Einlagen auf Risse prüfen.
11. Beachten Sie: Die Einlage ist für die entsprechende Indikation vom Arzt hergestellt worden, bei veränderter Indikation ist diese ungeeignet.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Bleier